


AMBIC®

Brunsterkennung

Seit vielen Jahren geht die Herdenfruchtbarkeit zurück, und das kostet die Milchviehhalter Tausende jedes Jahr wegen sinkender Herdenleistung. Mehr denn je hängt heute die Rentabilität der Milchviehhaltung davon ab, dass die Kühe so schnell wie möglich nach dem Abkalben wieder trächtig werden.

Die Bedeutung zuverlässiger Brunsterkennung für die Herdenfruchtbarkeit kann gar nicht unterschätzt werden. Kühe, deren Brunstverhalten nicht erkannt wird, können nicht besamt, also auch nicht trächtig werden! Je mehr Kühe zum richtigen Zeitpunkt besamt werden, desto mehr Kühe werden auch trächtig. Wenn Sie also den Prozentsatz erkannter Brünste z.B. von 40 % auf 60 % erhöhen, erhöht sich auch die Anzahl trächtiger Kühe in einem bestimmten Zeitraum um 50 %.

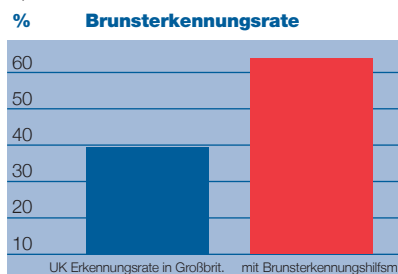

Einer der zuverlässigsten Hinweise darauf, dass eine Kuh brünstig ist, ist der Nachweis ihres Brunstverhaltens. AiAlert™ Extra-Brunsterkennungskapseln verkürzen die zur Herdenbeobachtung aufzuwendende Zeit und können so die Anzahl Kühe deutlich erhöhen, bei denen Brunstverhalten nachgewiesen wird.

IHR AMBIC-HÄNDLER:



SHEET No. AA6420 01.01.18

Ambic Equipment Limited
1 Parkside, Avenue Two,
Station Lane, Witney,
Oxfordshire, OX28 4YF, England

Tel: +44 (0)1993 701936/7
Fax: +44 (0)1993 779039
Email: sales@ambic.co.uk




Zert No. 14472
ISO9001
ISO14001

© Ambic Equipment Limited 01.01.18

AMBIC®

...konstruiert für den Milchviehhalter von heute

AiALERT™ Selbsthaftend zur Brunsterkennung

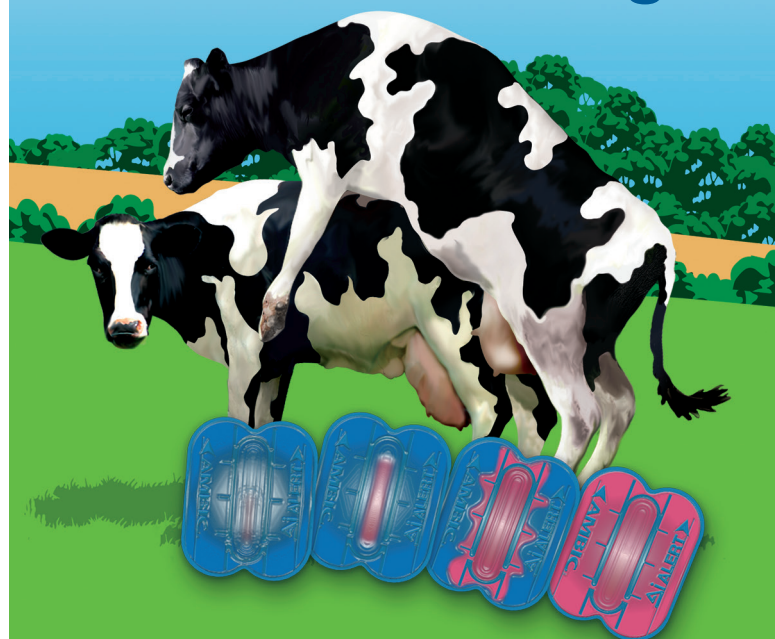

- Selbsthaftend - kein Hantieren mit Klebstoff nötig
- Einfach anzubringen, bloß abziehen und aufkleben
- Große Oberfläche, bessere Haftung
- Einzigartiges PVC, sitzt sicherer durch Anpassung an Körperform der Kuh
- Geeignet für Milchvieh- und Fleischviehbesamung

- Anwenderfreundlich
BLOSS VORBEREITEN / ABZIEHEN / AUFKLEBEN!

Besuchen Sie Ambics Webseite www.ambic.co.uk

leading best practice in livestock health management

AMBIC®

AiAlert™ Extra Funktionsweise

AiAlert™ Extra ist ein einfaches, selbsthaftendes Hilfsmittel, das sich leicht an der Kuh anbringen lässt und optisch meldet, dass bei der Kuh Brunstverhalten eingesetzt hat.

AiAlert™ Extra zeigt Brunstverhalten durch eine Kapsel an, die druckempfindlich ist und aktiviert wird, wenn die brünstige Kuh sich von anderen bespringen lässt.

Die AiAlert™ Extra Kapseln verfügen über eine integrierte Auslöseverzögerung, die dafür sorgt, dass der Aufsprung mindestens etwa 3 Sekunden gedauert haben muss, damit die Kapsel aktiviert wird. Werkstofftechnisch besteht die Kapselwand aus Gängen und Kammern, die der Farbstoff immer mehr füllt, je stärker das Brunstverhalten wird.

Durch die Verzögerung kann zwischen echter Empfängnisbereitschaft und Bespringen aus anderen Gründen unterschieden werden. Damit wird „falscher Alarm“ verhindert.



Bestellhinweise

Erhältlich im 10er- und 40er-Pack

Art. Nr. Anz. AiAlert™ Extra

AA/010 10

AA/040 40

AR/001 Ersatzreinigungstuch



AMBIC®

AiAlert™ Extra Gebrauchsanweisung

Vorbereitung des Tierbereichs

Entfernen Sie alle Hindernisse, z.B. Viehbürsten, an denen die Kuh ihren Rücken reiben und so die AiAlert™ Extra Kapsel aktivieren oder abreißen könnte.

Vorbereitung der Oberfläche

Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Haare mit dem mitgelieferten AiAlert™ Extra-Reinigungstuch. Wenn der Bereich sehr schmutzig ist oder das Fell dort verfilzt ist, striegeln Sie erst ab, bevor Sie das AiAlert™ Extra-Tuch verwenden. Bürsten Sie aber nicht zu kräftig durch, da dadurch der Feuchtigkeitshaushalt des Fells gestört wird, was die Hafteigenschaften verschlechtert. Bringen Sie die Kapsel nur auf trockenem Fell an, niemals bei Nässe.



Wahl der richtigen Stelle

Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel beim Anbringen mindestens -5°C (23°F) warm ist. Wärmen Sie sie ggf. in einem warmen Raum oder am Körper vor. Ziehen Sie den Schutzfilm ab und bringen Sie die Extra™ Extra-Kapsel auf dem Rücken der Kuh an, und zwar vor der Kruppe, auf Höhe der Hüfte am Schwanzansatz, wie auf der Abbildung. In diesem Bereich übt der Bug der aufspringenden Kuh am meisten Druck aus und löst die AiAlert™ Extra-Kapsel aus. Haftung und Erkennungsleistung sind nur bei Anbringung an der richtigen Stelle optimal.



Anbringung des AiAlert™ Extra

Drücken Sie die AiAlert™ Extra-Brunsterkennungskapsel fest auf das Fell des Tiers, indem Sie mit den Fingern den gesamten Haftbereich feststreichen. Üben Sie dabei aber keinen Druck auf die Kapsel selbst aus, da Sie sie aktivieren könnten.

Wahl des richtigen Zeitpunkts

ABringen Sie die AiAlert™ Extra-Kapsel 25 Tage nach Abkalben an. Sollte die Kapsel auch 14 Tage später noch nicht ausgelöst haben, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Die AiAlert™ Extra-Kapseln können auch nach der Besamung eingesetzt werden, um Tiere zu erkennen, die nach drei Wochen wieder brünstig werden.

