

AiReady™ Preguntas frecuentes

[¿Cómo funciona AiReady™?](#)

[¿Cuándo debo aplicar los parches?](#)

[¿Dónde debo colocar los parches AiReady™?](#)

[¿Cómo preparo la superficie?](#)

[¿Es la temperatura ambiente importante?](#)

[¿Por qué hay varios colores disponibles?](#)

[Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?](#)

- [¿Cómo funciona AiReady™?](#)

El revestimiento plateado sobre el parche AiReady™ es removido de la vaca durante la conducta de monta por parte de otras vacas. A medida que aumenta la conducta de monta, más se desprende el revestimiento plateado y esto ayuda a distinguir entre el verdadero calor de las montas falsas.

[Top](#)


- [¿Cuándo debo aplicar los parches?](#)

Los parches AiReady™ se deben aplicar 25 días después del parto con el fin de detectar el primer ciclo estral.

[Top](#)

- [¿Dónde debo colocar los parches AiReady™?](#)

Los parches AiReady™ se deben aplicar atravesados, bastante más adelante de la grupa, justo detrás de las caderas y de la cabeza de la cola puesto que éste es el lugar donde la vaca que monta ejercerá la presión máxima - Ver las imágenes siguientes:

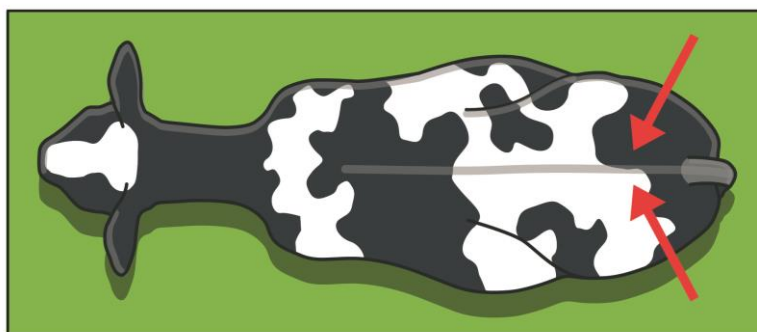

[Top](#)

- ¿Cómo preparo la superficie?

Quitar el polvo y los pelos sueltos con el paño atrapapolvo suministrado. En el caso de superficies muy sucias o vacas que están pelechando, se recomienda usar un peine antes de usar el paño atrapapolvo. Asegúrese de no cepillar demasiado fuerte ya que esto puede activar los aceites naturales de la piel y reducir la adherencia. La superficie debe estar seca, por lo que no intente colocar el parche AiReady™ sobre la piel mojada o en condiciones ambientales húmedas. Hay paños atrapapolvo de repuesto disponibles (AR/001). Presione firmemente con toda la mano sobre el parche y ejerza un ligero movimiento hacia delante y hacia atrás para que el parche pegue bien sobre la piel de la vaca.

[Top](#)

- ¿Es la temperatura ambiente importante?

A fin de maximizar la adherencia de los parches, estos deben ser calentados por lo menos a la temperatura corporal antes de su colocación. Los parches no se deben aplicar durante condiciones ambientales húmedas o cuando la vaca está mojada.

[Top](#)

- ¿Por qué hay varios colores disponibles?

Ofrecemos una amplia gama de colores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de tal manera que los parches AiReady™ puedan ser utilizados para resaltar la conducta de monta progresiva como parte de un completo programa de gestión de fecundidad. Los colores disponibles son: Rojo, Amarillo, Magenta y Verde. Por ejemplo se puede utilizar diferentes colores para destacar a las vacas que nunca han sido servidas, o identificar y diferenciar entre las vacas problema de aquellas que han tenido tratamiento veterinario para la fertilidad, o aquellas que vuelven a entrar en celo después de 3 semanas.

[Top](#)

- ¿Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?

Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico o por teléfono:

tech@ambic.co.uk

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Top](#)