

DipMizer™ y Cassette DipMizer™ Preguntas frecuentes

DipMizer™

Cassette DipMizer™

[Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?](#)

DipMizer™

[¿Puedo usar el DipMizer™ con cualquier tipo de vaso para dipping?](#)

[¿Cómo debo limpiar mi DipMizer™?](#)

[¿Cómo puedo cambiar el cepillo insertado?](#)

[¿Con que frecuencia debo limpiar mi DipMizer™?](#)

[¿Con qué frecuencia debo cambiar el cepillo insertado?](#)

[¿Hay riesgo de formación bacteriana?](#)

Cassette DipMizer™

[Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?](#)

- [¿Puedo usar el DipMizer™ con cualquier tipo de vaso para dipping?](#)
El DipMizer™ se puede usar con la mayoría de los vasos para dipping de Ambic. Sin embargo, no es adecuado para usar con vasos para dipping de productos espumantes.

[Top](#)


- [¿Cómo debo limpiar mi DipMizer™?](#)
Le recomendamos limpiar su DipMizer™ después de cada ordeña y desarmarlo para una limpieza más prolija una vez por semana. Use un cepillo limpio para cada ordeña.

Después de cada ordeña se puede limpiar el DipMizer™ sumergiéndolo en agua caliente con un detergente o un producto desinfectante. Masajee bien las cerdas del cepillo mientras está en el agua. Elimine del cepillo cualquier resto de suciedad o de producto químico solidificado. Deje que el cepillo se seque completamente antes de volver a colocarlo en el vaso para dipping.

Una vez a la semana retire el conjunto del cepillo del soporte de goma levantando el borde de la goma alrededor de la pestaña de acero del cepillo. Se debe limpiar tanto la sección de goma como el cepillo (igual que la limpieza diaria) para evitar la acumulación de suciedad y producto químico entre la goma y el acero.

[Top](#)

- [¿Cómo puedo cambiar el cepillo insertado?](#)
Cambiar el cepillo insertado es muy sencillo. Simplemente levante el borde de la goma alrededor de la pestaña de acero del cepillo y remueva (como se recomienda para la limpieza semanal). Introduzca el nuevo cepillo y deje que el soporte de goma vuelva a su posición. El cepillo para insertar no tiene una parte superior o inferior, por lo que no se puede poner al revés.

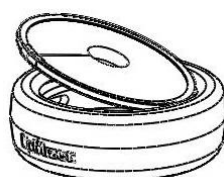

[Top](#)

- ¿Con que frecuencia debo limpiar mi DipMizer™?
Debe limpiar el DipMizer™ después de cada ordeña y desarmarlo completamente para una limpieza más profunda una vez a la semana.

[Top](#)

- ¿Con qué frecuencia debo cambiar el cepillo insertado?
No tenemos una recomendación precisa para ello. Sin embargo, si los cepillos están visiblemente dañados o son difíciles de limpiar, deben ser reemplazados. El consumo de producto químico aumentará cuando el DipMizer™ comienza a perder su eficacia.

[Top](#)

- ¿Hay riesgo de formación bacteriana?
Si no se cumple el procedimiento de limpieza recomendado se podría producir contaminación bacteriana del producto químico utilizado para el dipping. Remítase al documento y cartel relacionado para más información:
[Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment](#)
(Comparación de la carga bacteriana entre diferentes tipos de vasos para dipping con o sin accesorio)

[Top](#)

Cassette DipMizer™

[¿Puedo usar un Cassette DipMizer™ con cualquier tipo de vaso para dipping?](#)

[¿Cómo puedo limpiar mi Cassette DipMizer™?](#)

[¿Con que frecuencia debo limpiar mi Cassette DipMizer™?](#)

[¿Cómo puedo cambiar el cepillo insertado?](#)

[¿Con qué frecuencia debo cambiar el cepillo insertado?](#)

[¿Hay riesgo de formación bacteriana?](#)

[DipMizer™](#)

[Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?](#)

[Top](#)

- [¿Puedo usar un Cassette DipMizer™ con cualquier tipo de vaso para dipping?](#)

El Cassette DipMizer™ se puede usar con la mayoría de los vasos para dipping de Ambic. Sin embargo, no es adecuado para usar con vasos para dipping de productos espumantes.

[Top](#)

- [¿Cómo puedo limpiar mi Cassette DipMizer™?](#)

Le recomendamos limpiar su Cassette DipMizer™ después de cada ordeña y desarmarlo completamente para una limpieza más prolija una vez por semana. Use un cepillo limpio para cada ordeña.

Después de cada ordeña se puede limpiar el Cassette DipMizer™ sumergiéndolo en agua caliente con un detergente o un producto desinfectante. Masajee bien las cerdas del cepillo mientras está en el agua. Elimine del cepillo cualquier resto de suciedad o de producto químico solidificado. Deje que el cepillo se seque completamente antes de volver a colocarlo en el vaso para dipping.

Una vez a la semana el conjunto del cepillo debe ser completamente retirado desde el chasis tirando el borde recto del plástico y soltando el cepillo de su soporte de plástico. Se debe limpiar tanto la sección de goma como el cepillo (igual que la limpieza diaria) para evitar la acumulación de suciedad y producto químico entre la goma y el acero. El cepillo para insertar no tiene una parte superior o inferior, por lo que no se puede poner al revés.

[Top](#)


- [¿Con que frecuencia debo limpiar mi Cassette DipMizer™?](#)

Debe limpiar el Cassette DipMizer™ después de cada ordeña y una vez a la semana desarmarlo completamente para una limpieza más profunda.

[Top](#)

- ¿Cómo puedo cambiar el cepillo insertado?

Cambiar el cepillo insertado es muy sencillo. Simplemente retire el conjunto del cepillo desde el chasis tirando el borde recto del plástico y suelte el cepillo de su soporte de plástico. El cepillo para insertar no tiene una parte superior o inferior, por lo que no se puede poner al revés.

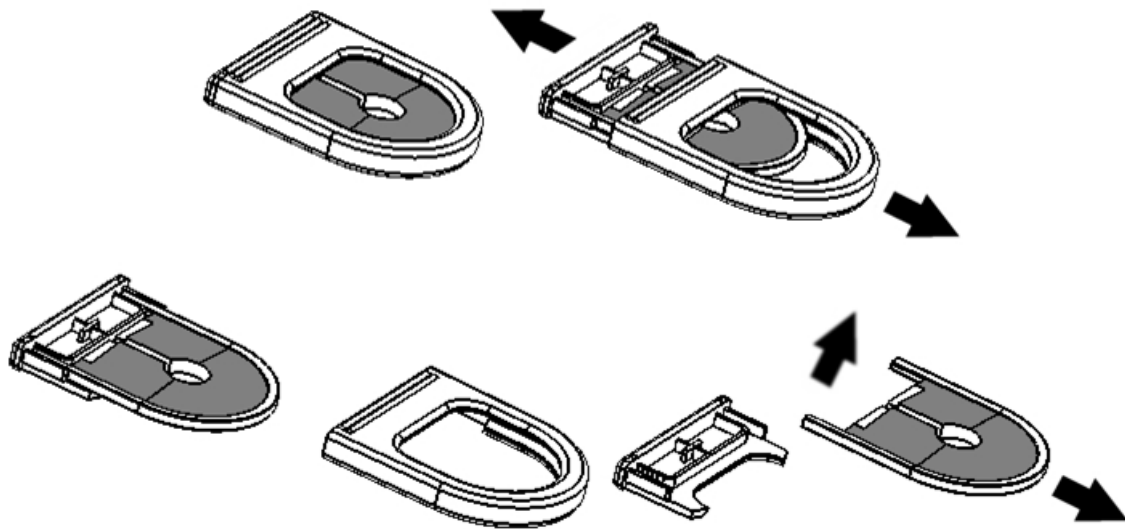

[Top](#)

- ¿Con qué frecuencia debo cambiar el cepillo insertado?

No tenemos una recomendación precisa para ello. Sin embargo, si los cepillos están visiblemente dañados, o son difíciles de limpiar, deben ser reemplazados. El consumo de producto químico aumentará cuando el DipMizer™ comienza a perder su eficacia.

[Top](#)

- ¿Hay riesgo de formación bacteriana?

Si no se cumple el procedimiento de limpieza recomendado se podría producir contaminación bacteriana del producto químico utilizado para el dipping. Remítase al documento y cartel relacionado para más información:

[Comparison of bacterial load between teat dip cup types with or without attachment](#)

(Comparación de la carga bacteriana entre diferentes tipos de vasos para dipping con o sin accesorio)

[Top](#)

- Mi pregunta no ha sido respondida - ¿Cómo puedo obtener más información?

Para más información técnica, póngase en contacto con Ambic, ya sea por correo electrónico o por teléfono:

tech@ambic.co.uk

Tel: +44 (0) 1993 776555

[Top](#)