


Nota : NON ADAPTE aux gobelets de trempage MOUSSANT

## UTILISATION DU DIPMIZER™ CASSETTE

DipMizer™ placé sur le gobelet de trempage

## LAVAGE APRES CHAQUE TRAITE


- Enlever le DipMizer™ du gobelet de trempage.
- Laver en le submergeant dans de l'eau chaude enrichie d'un détergent/stérilisant.
- Bien frotter les poils de la brosse sous l'eau.
- Si présent, éliminer de la brosse les souillures et le produit de trempage durci.
- Attendre que la brosse ait complètement séché.
- Remettre en place sur le gobelet de trempage.

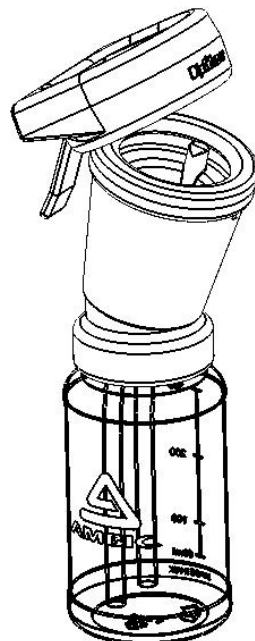

## DEMONTAGE DE LA CASSETTE UNE FOIS PAR SEMAINE

- Enlever le DipMizer™ du gobelet de trempage.
- Retirer la cassette de son support en caoutchouc.
- Au besoin, SI LAVAGE INTENSIF DE RIGUEUR, sortir la brosse de la cassette (voir au dos).
- Laver TOUTES LES PIECES dans de l'eau chaude, comme c'est décrit sous « Lavage après chaque traite ».
- Attendre que la brosse ait complètement séché.
- Remettre en place la brosse dans cassette et celle-ci dans son support en caoutchouc.
- Remettre le tout en place sur le gobelet de trempage.

(Dé-) Montage de la cassette

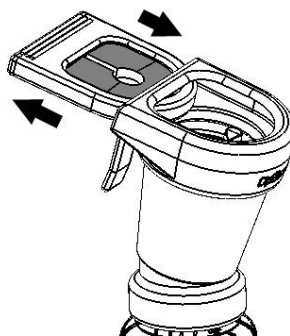

### AVERTISSEMENT !

Le fait de NE PAS OBSERVER la procédure de lavage conseillée peut entraîner la CONTAMINATION BACTERIENNE du produit de trempage des trayons.

## DEMONTAGE DE LA CASSETTE, SI BESOIN

